

Fußbetsandale mit Zehensteg

Anfertigungs-Video auf YouTube

Mit den sommerlichen Temperaturen kommen zunehmend auch wieder schöne und im Trend liegende Zehensteg-Sandalen zum Vorschein. Auch für den orthopädischen Bereich gibt es mittlerweile tolle Möglichkeiten, solche Sandalen anzufertigen. Unser Beitrag zeigt die individuelle Anfertigung einer Fußbetsandale aus farbenfrohen nora Materialien. Das zugehörige Video ist auf dem YouTube Kanal nora systems GmbH zu finden.

Die Zehenstegsandale mit Fußbett wird aus Lunasoft SLW (ca. 30 Shore A) in 20 mm und Lunasoft SL (ca. 40 Shore A) in 6 mm sowie einer richtungsfreien Laufsohle aus Astrolight in 4 mm gefertigt. Das hochwertige Lederriemchen wurde von einem Schäftemacher individuell angefertigt und zugekauft.

Alle verwendeten nora EVA-Materialien sind...

- hochwertige Qualität, made in Germany!
- hygienisch geschlossenzelliges EVA
- abwasch- und desinfizierbar
- SG schadstoffgeprüft
- dermatologisch auf Hautverträglichkeit getestet

Zunächst werden mit einer Zugabe von ca. 1-2 cm Lunasoft SLW sowie Lunasoft SL auf Größe des Leistens zugeschnitten. Das Schneiden sollte möglichst mit einem Messer mit Sicherheitsklinge erfolgen oder alternativ mit einer Säge oder Stanze. Dann wird Astrolight Delta mit Zugabe von max. 1 cm angezeichnet und ebenfalls zugeschnitten.



Anschließend wird Lunasoft SLW im Ofen erwärmt.

Temperatur: 110-130°C

Aktivierzeit: 6-7 Minuten

Das erwärmte Lunasoft SLW wird dann über den Leisten im Vakuumtiefziehgerät gelegt und tiefgezogen. Zur besseren Anformung von Pelotte und Zehensteg können Passteile aus Lunasoft SLW aufgelegt werden.




Das Material unbedingt gut auskühlen lassen, damit es dauerhaft in Form bleibt.

Abkühlzeit: ca. 12 Minuten

Nun wird das Basismaterial der Sandale in Form geschliffen. Dabei sollte besonders auf die Rolle und die gewünschte Sprengung geachtet werden.



Anschließend wird das Loch zur Durchführung des Zehenstegs gebohrt. Alternativ kann hierfür auch ein Stanzeisen verwendet werden. Durch dieses Loch wird das Zehenstegband, doppelt aufeinander gelegt, hindurch gedrückt.

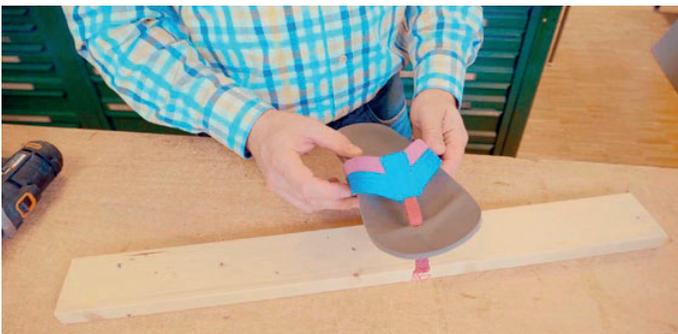

Weiter geht's: Um das Zehenstegband am Fußbett zu befestigen, wird die gewünschte Position des Riemchens idealerweise direkt am Fuß angezeichnet und Lunasoft SLW an der Position aufgeraut. Die entsprechenden Stellen auf dem Riemchen sowie auf Lunasoft SLW mit Klebstoff auf Polychloropren-Basis (CR) einstreichen und ablüften lassen. Auch Lunasoft SLW und Lunasoft SL zur optimalen Haftung anrauen und anschließend mit Klebstoff einstreichen.

Nun kann das Riemchen seitlich und unten angeklebt werden. Und gut andrücken! Das doppelte Zehenstegband nach oben und unten ankleben. Für die

optimale Klebekraft wird die Zwischensohle unterseitig vorsichtig geschliffen und dann mit Klebstoff eingestrichen. Und wieder gut ablüften lassen! Dann Lunasoft SLW auf Lunasoft SL aufkleben und das Riemchen vollständig in Lunasoft SL einbetten.



Schneiden Sie überstehendes Material zunächst ab, um es präziser schleifen zu können.



Nach dem Schleifen wird Lunasoft SL mit Klebstoff eingestrichen, um nach dem Ablüften das Sohlenmaterial Astrolight Delta ankleben zu können. Es empfiehlt sich erneut überstehendes Material abzuschneiden, um es anschließend besser in Form schleifen zu können. Und fertig ist die Zehenstegsandale mit Fußbett.

Probieren Sie es aus und platzieren Sie die Füße Ihrer Kundinnen und Kunden in handgefertigten, bequemen und farbenfrohen Zehenstegsandalen.

Finden Sie uns auf YouTube, indem Sie zum Beispiel „Fußbettsandale mit Zehensteg“ eingeben oder scannen Sie den QR Code mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet. Wir freuen uns über Feedback und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, um jederzeit über neue Videos informiert zu werden.

